

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 500449
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年2月10日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☒	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	森川 胃腸科 内科 様				TEL: 0827-23-7541
所在地	山口県 岩国市 中津町 1-21-10				ご担当 様
販売店	株式会社 アスラム 岩国支店 様				ご担当 西岡 様
納入年月日	2019 年 11 月 28 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
保守点検 (2年目)	酸素圧力異常 2 F200	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容
下記部品交換、試運転実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1076
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0304/712A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常等 ない。いつもキレイに使用頂いておられる。

装置情報	交換後運転回数: 248	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 16	殺菌/消毒+7L: 1526
	リークチェック: 0	自己洗浄: 414	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 16062353			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140605-004			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
水フィルター	☒	1	チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
エアフィルター	☒	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 松本玲子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木