

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 500625
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2022年1月27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	堀川内科胃腸科消化器科 様	TEL 082-842-7533
所 在 地	広島県広島市安佐北区深川3-11-20	ご担当 様
販 売 店	(株)中村酸素 様	ご担当 南部 様
納入年月日	2021 年 1 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有・無 ☒	シャワー 有・無 ☒
・保守点検（初回のみ無償）		分解 有・無 ☒
・減圧弁取付		給・排水F 有・無 ☒
		シンク排水

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 810
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 030X1 T72A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・12月27日に点検完了。

装置 情報	交換後運転回数: 100	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 4.0.96.0	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 94	アルコール単独: 0	エア単独: 96

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17112907			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200401-001			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☒	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3	減圧弁	☐	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 竹本 明子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本