

内視鏡洗淨機 ONW-10

作業報告書 (仮)

作業日 平成 20 年 9 月 24 日

機種 000106

ユーザ名 浜田市 国保 ^{波佐診療所}~~波佐診療所~~ 様

不具合発生日 平成 20 年 9 月 24 日

作業者 中澤 - 裕

不具合内容 エラ-「8」 (オゾンガス洩)

作業内容、原因

オゾンガスセンサが故障して警報が出かし続いていた。
センサを交換して復旧しました。

(センサの故障を検知して エラ-8 ともなっている)

ご署名 齊藤 稔哲

後日 正式な報告書を郵送しますので
差し換えをお願いいたします。

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕一 

点検年月日	平成20年 9 月 24 日	機種名	ONW-10	製造機番	000106
設置場所				TEL : 0855-44-0001	
設置時期	平成15年 4月 11日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐ 未実施	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐ 濃度 :	% 流量 :	L/min 圧力 : MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	エー「8」オゾンガス戻り復旧
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
オゾンガスセンサー	交換 ☒	一個	

別紙 作業報告書 (仮) の
正式版です。

年 月 日

ご署名 別紙にて署名済 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。