

面谷内科循環器科クリニック 御中

- 不具合状況 -

電源OFF状態で

機械が「-」を表示して動き出す

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成 21年 8 月 7 日	機種名	ONW-10	製造機番	000780
設置場所				TEL: 0859-38-1600	
設置時期	平成 17年 4月 12日	使用時間	CNT 944	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☒ 定流量弁清掃	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☐ 未	濃度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒ 2回			
酸素発生	正常	☐ 濃度:	% 流量:	L/min 圧力: MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒ FTS	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	電源OFF状態でも水を検知すれば排水動作をして水が無くなれば停止します。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
フィルタ-2 消失		

排水口から水が逆流しないように
排水ホースの位置を高くしました。



21 年 8 月 7 日

ご署名 中澤 裕



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

※ 既に 直転プログラム Ver10 取扱