

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20111209
発行日 平成 23年12月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100101 上部用
作業年月日	平成23年 12月 9日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	泉胃腸科		TEL: 0852-27-4976
所在地	島根県松江市黒田町94-9		担当 様
販売店	株式会社サンキ		担当 様
納入年月日	平成 22年 8月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
<u>出張</u> ・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守一回目実施			
不具合原因、作業内容			
運転プログラム Ver 0104 / TC1.A 変更			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残 9 MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 510
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした			

装置 情報	交換後運転回数: 625 → 0 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 576	殺菌+7L: 54
	リークチェック: 618	自己洗浄: 7	7Lコール単独: 55
エア単独:	1		

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2023年 12月 9日
松江市黒田町94-9
医療法人社団 泉胃腸科医院
ご署名 泉 明 夫 印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	