

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20120425

発行日 平成24年 4月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100191
作業年月日	平成24年 4月25日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	公立邑智病院		TEL:	0855-95-2111
所在地	島根県邑智郡邑南町中野3848-2		担当	様
販売店	(株)エパルス 浜田営業所		担当	様
納入年月日	平成22年 9月 29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 3 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

殺菌時給水異常(E:202) H24/3 17日 1F→2F 機械物設置後発生
4/3 16:43、4/16 14:40

不具合原因、作業内容

給水の流量が規定より少ないことが原因です。
給水開始から満水になるのに7分かかっていました。(10分かると異常がもます)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ポンベ 4MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 509
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐ 設備側の継手より漏れ
給水ライン	正常 ☐ 給水ストレーナ清掃	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

- ・機械性能は異常ありませんでした。給水圧が弱くシャワーが弱いので
- ・定期的(約2回/12日)のストレーナ清掃。スプアの予備洗浄をお願いします。

装置情報	交換後運転回数: 401	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 765	殺菌+7L: 1272
	リークチェック: 1288	自己洗浄: 369	7Lコル単独: 82	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ	交換	☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年 4月 25日

ご署名 上田 賢 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者
新鋭工業 井田
H24.4.25 IHI シバウラ
中澤