

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 5 月 18 日

|       |                                          |                                 |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号                                                             | 100187                                        |
| 作業年月日 | 平成 24 年 5 月 18 日                         |                                 | 作業時間                                                             | 1 Hr                                          |
| 顧客名   | おむす内科クリニック                               |                                 | TEL                                                              | 0852-31-5588                                  |
| 所在地   | 鳥取県松江市吉原 5-4-8                           |                                 | 担当                                                               | 様                                             |
| 販売店   |                                          |                                 | 担当                                                               | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成 13 年 4 月 23 日                         | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 年 / 回目                                                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                  |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パル数    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

非常に清潔に使って頂いております。

|          |          |                |         |        |
|----------|----------|----------------|---------|--------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 3/3 | 殺菌+7L: |
|          | リークチェック: | 自己洗浄: 289      | 7L単独:   | エア単独:  |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 給水ライン   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 細管送水ライン |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒690-0804 鳥取県松江市吉原 5-4-8

おむす内科クリニック 日

小村 秀史

ご署名

TEL 0852-31-5588 印  
FAX 0852-31-0550

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27  
TEL: 0859-34-5675

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 井田    | 新鋭  |