

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130219
発行日 平成 25年 2月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100275
作業年月日	平成25年 2月 19日	作業時間:	Hr
顧客名	大田市国民健康保険仁摩診療所	TEL:	0854-88-9030
所在地	島根県大田市仁摩町仁万643-1	担当	様
販売店	(株)エバルス	担当 佐々木	様
納入年月日	平成23年 7月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

起動時にエラーが出る (E103, E104, E400)
電源リセットすると復旧する

不具合原因、作業内容

コントロール基板を交換して調査いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 405
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 120	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 318	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 2	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
コントロール基板		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H25年 2月 19日

ご署名 泉司郎 泉印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 25.2.19 澤	中 25.2.19 澤