

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130408

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	鳥取県鳥取市富安 2丁目149			機番	001587
環営	ユーザー名	おかだ内科 様			納入日	平成20年4月16日
	点検者	小野定之	作業時間		受付日	平成25年3月28日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年4月8日

修理依頼・苦情内容

・ブレーカトリップ（運転中にチューブはずれ発生）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・ブレーカトリップは運転では、再現しませんでした。
原因）現状の乾燥した水跡（写真1）よりチューブはずれによるオーバーフローした水が、配線のコネクタに浸透しブレーカトリップに至ったと思われます。
処置）配線コネクタ部に、水浸透防止用にビニールカバー（写真2）をつけました。



写真1)



写真2)

- ・運転中フタがロックされなかったので、調整し修理しました

承認

安
25.4.8
田

審査

中
25.4.8
澤

作成

小
13.4.08
野

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.32～0.52mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度： 91.5 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.118～0.210MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一