

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140116

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	島根県松江市大庭町1381-2		機番	000180
環営	ユーザー名	中西医院 様		納入日	平成15年 5月19日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成25年10月15日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年 1月 7日

修理依頼・苦情内容

・水漏れ（床一面に水が出た）


不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

お預かりしている間、下記の点検をしましたが水漏れは再現しませんでした。
 ・洗浄運転・・・10回（給水側の供給圧力を0.1～0.4MPaに変化させた）
 ・水槽に水を張った状態で5日放置

給水～水槽～排水系統の内部点検をしたところ、お客様が開け閉めする水槽キャップのパッキンが劣化していました。ここから水が漏れたと推測してパッキンを交換し、キャップを開け易くするパッキンを追加しました。

写真：水槽キャップ 劣化品 新品 新規追加品

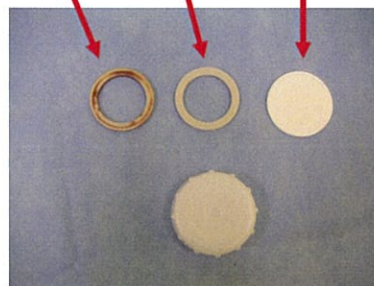

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.47～0.50 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.3% 酸素流量：0.81 L/min 圧力 0.127～0.219 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認

安
26.1.16
田

審査

中
26.1.16
澤

作成

H26.1.16

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水槽キャップパッキン	1式	
	オゾン分解触媒	1個	