

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-03139

No. 130430

納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機種	ONW-10
所在地	鳥取県倉吉市上井 302-1			機番	001507
ユーザー名	垣田病院 様			納入日	平成19年12月12日
点検者	小野定之	作業時間	2.5 Hr	受付日	平成25年3月27日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年4月30日

修理依頼・苦情内容

・インジケータの色があまり変わらない

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）


原因）・吸着筒・吸湿筒の劣化により酸素濃度が規定値90%を下回った為
インジケータの変色あまり変わらなかったと思われます。

処置）・不具合原因である吸着筒・吸湿筒の部品交換とオゾン分解触媒・
ドレンフィルターの交換を行いました。（定期交換部品）
・フタスプリング折損につき交換を行いました。
・排水チューブ劣化につき交換を行いました。

写真1；（定期交換部品）
吸着筒・吸湿筒・オゾン分解触媒
ドレンフィルター



写真2；
フタスプリング・排水チューブ

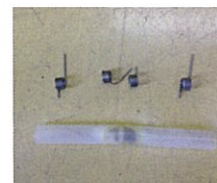

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.44～0.64mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.103～0.186MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒・吸湿筒	1式	
	ドレンフィルター	1個	
	オゾン分解触媒	1個	
	排水チューブ	1本	
	オゾンインジケータ（100X2 袋入り）	1箱	

承認

安
25.5-6
田

審査

中
25.5-6
澤

作成

小
13.5.06
野