

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 131114

納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店殿			機種	ONW-10
所在地	鳥取県米子市中島2-1-46			機番	001204
ユーザー名	新田外科胃腸科病院 様			納入日	平成18年12月27日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成25年9月19日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年11月14日

修理依頼・不具合内容

排水異常修理、定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水系統の詰まりと排水ポンプ、水位レベルセンサーの性能劣化が異常の原因でした。
これらの部品を交換して復旧しました。

写真1；センサ類、パッキン、水ポンプ、スプリング



写真2；定期交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- 運転プログラム Ver 8⇒10書換え
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
- オゾン水濃度測定：0.46～0.52mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.5% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.101～0.183 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
	水位レベルセンサー、オゾンセンサー	3本	LVL、LVH、LVHH、AL
	フタスプリング	4個	
	配管チューブ、パッキン	1式	
	吸着、吸湿筒、触媒、フィルター	1式	定期交換部品