

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-03489

No. 140207

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株） 山陰支店 殿			機種	ONW-10
環営	1	所在地	鳥取県鳥取市正蓮寺43			機番	000828
		ユーザー名	イナカ内科医院 様			納入日	平成17年11月29日
		点検者	中澤一裕	作業時間	60Hr	受付日	平成25年12月4日
計	2	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年2月7日

修理依頼・苦情内容

オーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

定期交換部品をはじめ、性能が低下した部品を交換しました。

No1～3：定期交換部品一式



No4～9：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.50～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.2% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.099～0.182 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認



審査



作成

H26.2.7

中澤

交換部品

	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1式	
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		
4～6	水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
7	水位レベルセンサー	3本	LVL, LVH1, LVH2
8	フタスプリング	1式	
9	配管チューブ、パッキン	1式	