

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 4 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100191
作業年月日	平成 26 年 4 月 25 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	公立邑智病院 様		TEL:	0855-95-2111
所在地	島根県邑智郡邑南町中野3848-2		担当	日野 様
販売店	(株) エバルス 浜田営業所		担当	中本 様
納入年月日	平成 11 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回 目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に異常は見られませんでした。

不具合原因、作業内容

特にありませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.42 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検の他に、付属のリークチェックチューブ、鉗子口接続チューブを交換しております。

また、送気送水接続チューブに若干へたりが見られました。

装置情報	交換後運転回数: 1956	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2003	殺菌+7L: 2631
	リークチェック: 2042	自己洗浄: 842	7Lコル単独: 313	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	トレイ用吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26 年 4 月 30 日
邑智郡公立病院組合公立邑智病院
ご署名 日野 4 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	龜尾