

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 110117

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	島根県邑智郡邑南町上田所39-5			機番	000787
環営	ユーザー名	三笠記念クリニック 様			納入日	平成18年1月30日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	4Hr	受付日	平成23年1月5日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成23年1月17日
計	3					


修理依頼・苦情内容

エラー8（オゾンガス漏れ異常）
定期メンテナンス依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン分解触媒（定期交換部品）の性能劣化とオゾンセンサー故障を検知してエラー8を発報しました。

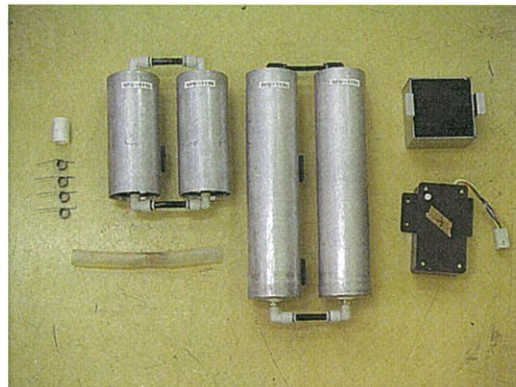

[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真を参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.45～0.50mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.5% 酸素流量：0.81L/min 圧力：0.082～0.143Mpa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成

H23.1.17

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1	定期交換部品
	吸着筒、吸湿筒	1	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1	定期交換部品
	オゾン水系配管	1式	排水シロコンチューブ 他
	フタスプリング	4	
	オゾンセンサー	1	