

点検、整備報告書

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2017 年 6 月 20 日
株式会社 I H I シバウラ

配布先		納 入 先	スクエア歯科 様	機 種	WD－1 5 0
客 先	1	代理店名	(株) モリタ青森営業所 様	機 番	1310041
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	スクエア歯科 様	納入年月日	平成 26 (2014) 年 5 月
		修 理 者	(株) I H I シバウラ サービス G r 安田		
計	3	返 送 先	青森県弘前市富田 3-10-21	発 送 日	2017 年 6 月 20 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

エラー番号 20 ; 排水未開始 (10/6, 10/11)

予備洗浄の排水で、排水検知センサー (LE2) が検知しない場合に発生します。

対応

2016/10/06 エラー 20 発生

2016/10/07 排水ポンプ交換

2016/10/11 エラー 20 再発

2016/10/12 コントロール基板交換



2016/10/13 終日運転立ち合い。19 時代替機と交換した

2016/10/14 代替機の運転立ち合い。

工場作業

コントロール基板～排水検知センサーの電気信号の不具合が原因でした。

この基板を新品に交換し、排水検知センサーも交換いたしました。

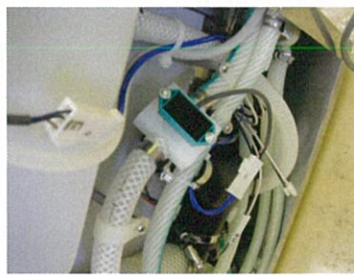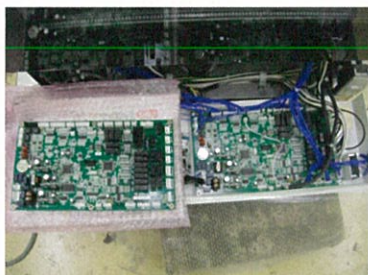

その他

承認

附属品 ; なし

交換部品

審査

部品番号

部品名称

数量

備考

コントロール基板

1 枚

排水検知センサー

1 個

作成

