

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140925

納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店	殿	機種	ONW-10
所在地	島根県松江市片原87		機番	000179
ユーザー名	幡内科医院	様	納入日	平成14年8月16日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年9月10日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年9月25日

修理依頼・不具合内容

エラー8（オゾンセンサ故障）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラー8は再現しました。点検したところオゾンセンサが故障しており、これが原因で異常が発生しました。この他に性能が低下した部品を交換いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.47～0.54 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.2% 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.104～0.183 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾンセンサ	1台	
	配管チューブ、パッキン	1式	
	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		SPS-11559

承認

安
14.9.25
田

審査

中
26.9.25
澤

作成

H26. 9. 25

中澤