

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140918

納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿		機種	ONW-10
所在地	島根県浜田市内村町787-8		機番	000145
ユーザー名	中村呼吸器内科医院 様（定期点検契約）		納入日	平成15年8月21日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年8月7日
返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年9月18日

修理依頼・不具合内容

部品交換

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音の原因である水ポンプを中心に、劣化した部品を交換しました。

写真：定期交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.42～0.53mg/L・・・正常

2. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：92.5 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.119～0.208 MPa（AC100V 60Hz）

3. 運転動作確認・・・正常

4. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成

H26. 9. 18

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1：オゾン水製造ポンプ）	1台	
	水ポンプ（P-2：内視鏡洗浄ポンプ）	1台	
	水ポンプ（P-3：排水ポンプ）	1台	
	水位レベルセンサー（L, H, HH）	3本	
	オゾンセンサー	1台	
	配管チューブ、パッキン	1式	