

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 141124

納 入 先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機 種	ONW-10
所 在 地	鳥取県境港市馬場崎町177			機 番	000992
ユ-ザ-名	市場 医院 様			納 入 日	平成18年9月12日
点 検 者	中澤一裕	作業時間	3.0 Hr	受 付 日	平成26年9月
返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成26年11月24日

修理依頼・不具合内容

オゾンインジケータ 変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

インジケータの変色不良を確認しました。（現物を下に貼り付けました）
PSA（酸素発生器）の性能低下が原因で、これを交換して復旧しました。

お願い

PSAは定期交換部品です。性能を維持するために、2年ごとに交換をお願いいたします。

インジケータ（変色不良 変色良好）

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.44～0.58 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.6% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.091～0.171 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常（現物を貼り付けました）

承認



審査



作成

H26. 11. 24

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品（PSA含む）	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		SPS-11663
2	水ポンプP-1	1台	オゾン水製造ポンプ
3	シリコンチューブ（排水電磁弁、排水ポンプ）	1式	※今回無償にて交換しました