

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 27 年 4 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100509
作業年月日	平成 27 年 4 月 8 日	作業時間:	Hr
顧客名	花田医院 様	TEL:	0855-55-0005
所在地	島根県江津市後地町 3023	担当	様
販売店	(株) エバルス 様	担当	様
納入年月日	平成 24 年 5 月 7 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

取替のバグラム Ver0105 / Tol.A → Ver0107 / Tol.A にバグラム交換

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 1.9 Mpa (赤)	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒ アルコールキャップ 破損	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 165
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。濃度計の交換時期を過ぎているので保守点検を受けて下さい

装置情報	交換後運転回数: 192	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 422	殺菌+アル: 291
	リークチェック: 0	自己洗浄: 6	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		アルコールキャップ		☒	1
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

先生へ 年 月 日

ご署名 了イサツの21 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
中 15.4.10 澤	山田 幸平