

おかだ内科 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:新鉄工業 赤井、ISM 中澤

点検年月日	平成27年 7 月 28 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 001587
設置場所	鳥取県鳥取市富安2丁目149			TEL	: 0857-30-3750
設置時期	平成20年4月16日	運転回数	5547	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.5 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 95.2 % 流量： 0.74 L/min 圧力： 0.103~0.183 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
オゾン分解触媒	交換	☒	1	異常ありませんでした
ドレンフィルタ	交換	☒	1	
吸着筒、吸湿筒	交換	☒	1	
排水シロコンチューブ	交換	☒	1	
	交換	☐		
	交換	☐		

平成 年 月 日

ご署名 寺谷美紀

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。