

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-03976

No. 150811

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 山陰支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	大賀内科クリニック 様		機番	100129
環営	所在地	島根県米子市西福原 4-2-1		納入日	平成 22 年 7 月 7 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 7 月 2 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 7 月 28 日

修理依頼・不具合内容

- ・タッチパネルが起動しない
- ・平成 27 年分 保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、異常が再現しました。
タッチパネル単独の故障で、これを交換して復旧しました。

写真：タッチパネル



[2] 作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

承認



審査



作成

H27. 8. 11

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	No. 087374H007485
	定期交換部品	1 式	
	オゾン水濃度計校正		濃度計バルブ：547
	オゾンセンサ校正		
	オゾン分解触媒、脱気フィルタ		
	排水栓、水槽コネクタ		

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528