

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100207	
作業年月日	平成27年10月27日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	月やしクリニック		TEL	087-32-2121	
所在地	鳥取市三湖山町南2-18-2		担当	院長先生 様	
販売店	高野医療センター (株)		担当	様	
納入年月日	平成22年10月7日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 1.5MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 463
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 270 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	133	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	殺菌+7L
	リークチェック	18	自己洗浄	アルコール単独	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホジ分解触媒		☒		ホジ分解触媒		☒	5
排水栓		☒		排水栓		☒	2
オゾン水濃度計		☒		オゾン水濃度計		☐	
" " 用试剂		☒		" " 用试剂		☐	
オゾンセンサー		☒		オゾンセンサー		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年10月27日

ご署名

林 貴史

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井