

点検・修理報告書

管理 No. 2019.03.04

発行日: 2019年 03月 04日

	WD-150	
作業年月日	2019 年 3 月 1 日	作業時間: 2 Hr
顧客名	外ヶ浜歯科診療所	TEL:
所在地	青森県	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 14080150	運転回数:	タッチパネルVer
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① ドア開閉用ワイヤー機械向って右側切れ			
原因			
① ドアワイヤーに掛かっているローラーの回転が不十分でローラーとワイヤーに摩擦抵抗が生じワイヤーに負担が掛かり破損と判断致します。			
処置、作業内容			
① ドアワイヤー左右交換 ローラー左右分解軸受にシリコングリスを塗布して摩擦抵抗をなくし回転を改善致しました。			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアワイヤー		2本		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
桐野	桐野
19/03/04	19/03/04