

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 10月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号： 100207
作業年月日	平成 28年 10月 7日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	はやしくリニック 様	TEL： 0857-32-2121
所在地	鳥取県鳥取市湖山町南2-181-2	ご担当 院長先生 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 22年 10月 6日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目	
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 655
排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70ppm
異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/> フルトタイプ交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 40	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アル： 295
	リークチェック： 90	自己洗浄： 34	アルコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；チューブ側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィル		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1728 10 7  
 鳥取市湖山町南2丁目181-2日  
 医療法人 はやしクリニック  
 ご署理 理事長 林 貴史 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
 TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井