

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成 28 年 6 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300007
作業年月日	平成 28 年 6 月 16 日		作業時間： 1,5 Hr
顧客名	町立奥出雲病院 様		TEL： 0854-54-1122
所在地	島根県仁多郡奥出雲町三成1622-1		ご担当 <u>吉川</u> 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様		ご担当 明石 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
OED-1000S 年間保守点検

不具合原因、作業内容
OED-1000S 保守点検部品交換実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルス数 <u>540</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 <u>540</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	排水フィルター	☐ 目詰まり(若干)

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
排水フィルター内に糸。糸巻きフィルターに若干の目詰まりが見られました。交換を推奨致します。
その他、異常は見られませんでした。

装置情報	交換後運転回数： <u>233</u>	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： <u>2199</u>	殺菌/消毒+アル： <u>841</u>
	リークチェック： <u>715</u>	自己洗浄： <u>638</u>	アルコール単独： <u>18</u>	エア単独： <u>0</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 6 月 16 日

町立奥出雲病院 内視鏡

ご署名 吉川 孝子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	赤井	作業者	亀尾
------	---	-------	----	-----	----