

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成28年6月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300324
作業年月日	平成 28 年 6 月 15 日			作業時間：1.5 Hr
顧客名	安達医院 鳥取県米子市西三柳2048			TEL：0859-22-9500
所在地	様			ご担当 三池 山田 様
販売店	納入年月日 平成 26 年 6 月 11 日			ご担当 山田 様
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目 ☐	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H28 OED-1000S 保守点検実施

点検項目	正常	異常	バブル数
フタロック	☒	☐	
酸素ライン	☒	☐	
アルコールライン	☒	☐	
オゾンセンサ	☒	☐	607
給水ライン	☒	☐	
濃度計流量	☒	☐	
水位センサー	☒	☐	
水漏れ確認	☒	☐	
清掃	☒	☐	
トレー	☒	☐	
殺菌槽コネクタ	☒	☐	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数：	523	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒：192	殺菌/消毒+7L：331
	リークチェック：	0	自己洗浄：	1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バブ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
バブ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
バブ水濃度計用7L用		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

F688-0853 米子市西三柳2048 日
TEL0859-22-9500 FAX0859-34-9434

ご署名：達医院 安達敏明



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

赤井

作業者

亀尾