

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 2 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300432
作業年月日	平成 29 年 2 月 17 日		作業時間： 1, 5 Hr
顧客名	中村内科胃腸科医院 様		TEL： 0855-22-8000
所在地	島根県浜田市笠柄町64		ご担当 様
販売店	ティーエスアルフレッサ株式会社 浜田営業所 様		ご担当 狩野 様
納入年月日	平成 27 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H29 保守点検実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 478
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 458 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
金口接続口が劣化（2カ所）抜けやなごりあり
特に異常はありませんが、排水フィルタの交換は年に1度必要となります。
次回点検時には交換をお勧め致します。前回のフィルタ交換日：2016年7月8日

装置 情報	交換後運転回数： 737	更新（リセット） ☒ 実施・ ☐ 未実施	殺菌/消毒： 996	殺菌/消毒+AL： 587
	リークチェック： /	自己洗浄： 523	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 2 月 17 日
浜田市笠柄町64番地
医療法人 中村胃腸科内科医院
ご署名 理事長 中村 洋
責任技術者 赤井
作業者 亀尾

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675