

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 11 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300367	
作業年月日	平成 28 年 11 月 10 日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	門 脇 医 院 様		TEL:	0852-76-2023	
所在地	島根県松江市八束町遅江384-2		担当	院長先生 様	
販売店	新鋭工業株式会社 山陰支店		担当	亀尾	
納入年月日	平成 26 年 9 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し。

不具合原因、作業内容

H28. OED-1000S 保守点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 482
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 106	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 5	殺菌+7L: 197
	リークチェック: 1	自己洗浄: 85	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	トレイ用吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 11 月 10 日

門脇医院(八束)

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
亀 尾	亀 尾