

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 7 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	160509
作業年月日	平成 28 年 7 月 13 日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	花田医院 様	TEL:	0855-55-0005
所在地	鳥根県江津市後地町3023	担当	本田 様
販売店	(株)エパルク 津支店	担当	中林 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H28. 保守点検実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 790
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	226	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	226	殺菌+アル:	38%
	リークチェック:	0	自己洗浄:	6	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	トレイ用吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ=水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ=台側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 7 月 13 日

医療法人社団 花田医院

〒699-2841 鳥根県江津市後地町3023

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

理事長 医師 花田 有 二

TEL 0855-55-0005 FAX 0855-55-3024

技術 井 根

作業 後