

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 6 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 300007
作業年月日	平成 28 年 6 月 30 日		作業時間： 1,5 Hr
顧客名	小竹内科循環器クリニック 様		TEL： 0859-35-8757
所在地	鳥取県米子市角盤町2-101-6		ご担当 佐藤 様
販売店	新鋭工業(株)山陰支店 様		ご担当 亀尾 様
納入年月日	平成 23 年 7 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H28. 保守点検実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

バルス数 475

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ホース劣化有り。代用品と交換致しました。他、異常はみられませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 115	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 381	殺菌/消毒+アル： 607
	リークチェック： 0	自己洗浄： 816	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 6 月 30 日

ご署名 小竹 貴 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
 TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾