

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 6 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号：100251
作業年月日	平成 28 年 6 月 13 日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	はらの内科・胃腸科クリニック 様	TEL：0852-20-1333
所在地	鳥根県松江市西津田5-21-15	ご担当 院長先生 様
販売店	(有)明石医科器械店 様	ご担当 山田 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 21 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H28. 保守点検 実施

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃 <input type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 401
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数：403 更新(セット) 実施・未実施	殺菌/消毒：14	殺菌/消毒+アル：1983
	リークチェック：1932 自己洗浄：1435	アルコール単独：11	エア単独：6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 6 月 13 日
 ご署名 星野 潮 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
 TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀