

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29 年 6 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100620
作業年月日	平成 29 年 6 月 16 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	平野医院 様	TEL： 0856-22-0998
所在地	島根県浜田市下府町69-1	ご担当 様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)益田支店 様	ご担当 瀬分 様
納入年月日	平成 23 年 2 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 保守点検実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☐

バルブ数 664

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 141	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 17	殺菌/消毒+7L： 639
	リークチェック： 652	自己洗浄： 545	アルコール単独： 1	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 6 月 16 日

島根県益田市駅前町33-5

(医) 平野医院

ご署名 平野 盛久 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
 TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾