

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年6月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300249
作業年月日	平成29年6月22日		作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	のぐち内科クリニック 様		TEL：0859-24-6101
所在地	鳥取県倉吉市上井町1丁目8-5		ご担当 院長先生 様
販売店	新鋭工業（株）山陰支店		ご担当 赤井 様
納入年月日	平成 26年5月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 <u>249</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： <u>617</u>	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： <u>38/</u>	殺菌/消毒+アル： <u>894</u>
	リークチェック： <u>0</u>	自己洗浄： <u>650</u>	アルコール単独： <u>38</u>	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；水槽側		☒	<u>2</u>
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；チューブ側		☒	<u>2</u>
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 6 月 22 日

ご署名

櫻村 綾子

のぐち内科
クリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井