

丸山内科クリニック 御中

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本件に関しまして調査結果をご報告申し上げますので、よろしくご査収頂き、今後とも
ご指導ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

調査報告書

修理依頼
番号

No. 130620

所在地	島根県浜田市相生町3921	機種	OED-1000
電話	0855-22-1115	機番	100497
納入先	新鋭工業(株) 山陰支店 殿	納入日	平成24年4月5日
点検者	(株) IHIシバウラ	受付日	平成25年6月13日

不具合内容・経緯

6/6 機械右側より水漏れが発生した

点検・修理 経緯：平成25年1月31 保守点検。2月18日オゾンリーク異常により修理

不具合原因・点検、調査結果

点検後にもかかわらず、不具合が発生させてしまい大変申し訳ありませんでした。
以下報告させていただきます。


1：点検内容

下記の点検を行いました。機械本体からの水漏れは再現しませんでした。

- ・給水側加圧検査・・・48時間実施
- ・水槽へ水を入れて静置・・・12時間実施
- ・運転確認・・・10回

2：推定原因

機械内部の上部側（カバー）から下部側（右前面キャスター）に水が垂れた跡があり
おそらく下の写真のよう鉗子ゴムが内視鏡から外れて、水がカバーにかかったと
思われます。

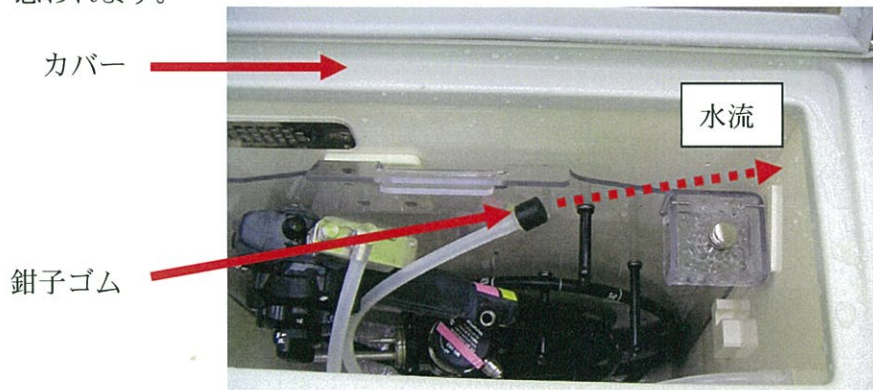

2：修理内容

水が掛かっても影響ないように、上部カバーの防水対策をいたします。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

(株) IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

承認



審査



作成

H25.6.20

中澤