

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130319
発行日 平成 25年 3月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100497
作業年月日	平成25年 3月 19日		作業時間:	Hr
顧客名	丸山内科クリニック		TEL:	0855-22-1115
所在地	島根県浜田市相生町3921		担当	様
販売店	(株)サンキ		担当	様
納入年月日	平成24年 4月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品 トレー	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張 <u>引取</u>	修理 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
オゾンリーク異常 (E:204)、オゾンセンサ故障 (E:100)			
不具合原因、作業内容			
オゾンセンサーが検知したまま、初期状態に戻りませんでした。			
このセンサーを交換して復旧しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 551
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 3	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 1546	殺菌+7L: 87
	リークチェック: 630	自己洗浄: 285	7L単独: 608	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☐	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
工場検査により不要		
ご署名		印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者