

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日：平成 29 年 6 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100245
作業年月日	平成 29 年 6 月 28 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	金島胃腸科外科 様		TEL：0856-22-2385
所在地	鳥根県益田市高津1丁目9-4		ご担当 様
販売店	(株)エパルス 浜田支店		ご担当 様
納入年月日	平成 23 年 7 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
ホバン水濃度計流量低下。保守点検バッチ部品交換。

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 657
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 交換
	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常ありません。ホバン濃度計流量基準値より回復しており、（現在657前後300）
また、今回サービスで代わっているチューブ類も交換させて頂いております。

装置 情報	交換後運転回数：125	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：47	殺菌/消毒+7L：98
	リークチェック：97	自己洗浄：29	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホバン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ホバン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ホバン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 6 月 28 日

ご署名 _____ 印 _____

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者 永井	作業者 亀田
---	-------------	-----------