

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日：平成 29 年 7 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300007
作業年月日	平成 29 年 7 月 13 日	作業時間： 1, 5 Hr
顧客名	町立奥出雲病院 様	TEL： 0854-54-1122
所在地	島根県仁多郡奥出雲町三成1622-1	ご担当 吉川 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様	ご担当 明石 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
保守点検依頼、給水不調-設置依頼

不具合原因、作業内容
H29年 保守点検実施

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 340
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐ 交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常はありませんでした。今日お、センサーに給水不調-を設置致しました。
交換目安は1年になります。以前に設置した排水不調-と併せて次年度点検時に交換をお願いします。

装置情報	交換後運転回数： 1100 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2855	殺菌/消毒+アル： 1286
	リークチェック： 1150 自己洗浄： 832	アルコール単独： 16	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 7 月 13 日
島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1
ご署名 町立奥出雲病院印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	赤井	作業者	亀尾
------	---	-------	----	-----	----