

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 9 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100367
作業年月日	平成 29 年 9 月 5 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	永生クリニック 様	TEL： 0854-52-0250
所在地	島根県仁多郡奥出雲町横田1063-1	ご担当 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様	ご担当 明石 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H29 9/4 本体下部より水漏れがする。

不具合原因、作業内容

H29年 保守点検実施

マニホールド周辺チューブ 劣化交換

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒ 清掃 ☐
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

バルブ数 332

履歴 0.67 ppm

交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今日は、保守点検部品に加え、本体内部のチューブ類も交換（2本）です。
 若干、オゾン濃度が低下（2.0以下）です。合格ライン 0.7±0.1 ppm.

装置 情報	交換後運転回数： 896	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 3128	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29年 9月 5日 島根県仁多郡奥出雲町横田1063番地1

医療法人社団信愛会

永生クリニック

ご署名

理事長 藤原

責任技術者

作業者

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
 TEL：0859-34-5675

赤井 亀尾