

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-04752

No. 180129

配布先	納入先	新鋭工業（株） 山陰支店 殿			機種	OED-1000	
客先	顧客名	中村医院 様			機番	100634	
環営	所在地	鳥取県米子市上後藤 3-1-6			納入日	平成 23 年 10 月 27 日	
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 29 年 11 月 16 日	
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 30 年 01 月 26 日	

修理依頼・不具合内容

水温高異常（E:206）

11/15 午前中 6 回正常終了、16 時 3 分に異常発生。その後 2 回正常終了
11/16 午前中 4 回異常発生。その後 6 回正常終了

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 水温高異常（E:206）につきまして

水槽内の水温が 50 度以上、または水温センサの故障で発生します。

[2] 点検結果

水温センサの信号が不安定で、これが原因で不具合が発生しました。
このセンサと、関係する部品を交換して復旧しました。

写真 1：定期交換部品一式

写真 2：修理部品一式



[3] 作業内容

- 1：定期保守点検とチューブ類の交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.73 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：5 殺菌：80945 殺菌＋アルコール：1156
リークチェック：1 自己洗浄：1303 アル単独：0 エア単独：3

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水温センサ	1 個	
	コントロール基板、タッチパネル	1 式	
	定期交換部品	1 式	

承認



審査



作成

H30. 1. 29

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名：IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528