

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 11 月 10 日

| | | |
|-------|--|---------------------------------|
| 販売名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | 製造番号： 300684 |
| 作業年月日 | 平成 29 年 11 月 10 日 | 作業時間： 1,5 Hr |
| 顧客名 | 浜田市国民健康保険 あさひ診療所 様 | TEL： 0855-45-0002 |
| 所在地 | 島根県浜田市旭町丸原138-1 | ご担当 様 |
| 販売店 | ティーエスアルフレッサ株式会社 浜田支店 様 | ご担当 狩野 様 |
| 納入年月日 | 平成 27 年 11 月 18 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品 |
| 作業区分 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 2年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29、総合保守点検実施

点検項目

| | | | |
|----------|--|--------------|--|
| フタロック | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 3x0 |
| オゾンセンサ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

| | | | | |
|------|-------------|----------------|------------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 47 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 20 | 殺菌/消毒+アル： 8x |
| | リークチェック： 82 | 自己洗浄： 81 | アルコール単独： 1 | エア単独： 0 |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 吸盤 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| 排水栓 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 接続コネクタ；水槽側 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
| オゾン水濃度計 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 接続コネクタ；チューブ側 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
| オゾン水濃度計用フィルタ | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| オゾンセンサー | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 11 月 10 日

浜田市国民健康保険あさひ診療所

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者 作業者

赤井 亀尾