

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年11月10日

|       |                                                                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         | 製造番号： 300685      |
| 作業年月日 | 平成 29 年 11 月 10 日                                                                                                             | 作業時間： 1, 5 Hr     |
| 顧客名   | 浜田市国民健康保険 波佐診療所 様                                                                                                             | TEL： 0855-44-0001 |
| 所在地   | 島根県浜田市金城町波佐イ441-1                                                                                                             | ご担当 様             |
| 販売店   | ティーエスアルフレッサ株式会社 浜田支店 様                                                                                                        | ご担当 狩野 様          |
| 納入年月日 | 平成 27 年 10 月 28 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 2 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 総合保守点検 実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 560    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。アルコールキャップ交換済。

|      |             |                |            |              |
|------|-------------|----------------|------------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 32 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 5   | 殺菌/消毒+アル： 66 |
|      | リークチェック： 68 | 自己洗浄： 48       | アルコール単独： 0 | エア単独： 0      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 11 月 10 日

ご署名 浜田市国民健康保険波佐診療所

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL：0859-34-5675

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
| 赤井    | 亀尾  |