

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成 30 3月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □										製造番号： 100731
作業年月日	平成 30 年 3 月 27 日										作業時間： 1 Hr
顧客名	たにぐちクリニック										様
所在地	鳥取県米子市尾高904										様
販売店	有限会社明石医科器械店										様
納入年月日	平成 25 年 7 月 23 日	保証期間	内 □ 外 □								付属品
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目	定期点検シール記入				☐
	出張・引取	☐	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H30 保守点検実施

点検項目		結果	状態
フタロック	☒	正常	殺菌槽 LED ☒ 正常
酸素ライン	☒	正常	エアライン ☒ 正常
アルコールライン	☒	正常	オゾン水濃度計動作 ☒ 正常
オゾンセンサ	☒	正常	排水栓、排水ライン ☒ 正常
給水ライン	☒	正常	細管送水ライン ☒ 正常
濃度計流量	☒	正常	排気ライン ☒ 正常
水位センサ	☒	正常	オゾン濃度 ☒ 正常
水漏れ確認	☒	正常	異常音、振動 ☒ 正常
清掃	☒	正常	電源コード ☒ 正常
トレー	☒	正常	殺菌チューブ類 ☒ 正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常	マニホールド周辺フェューグ ☒ 正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 5478 更新 (ロット) (実施)・未実施	殺菌/消毒： 568	殺菌/消毒+7L： 454
	リークチェック： 0	自己洗浄： 568	7Lコール単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フェューグ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成30 年 3 月 27 日
たにぐちクリニック
ご署名 谷口 哲也 印
責任技術者 作業者

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市哲生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675
菅井	菅井