

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 8 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301243
作業年月日	平成 30 年 8 月 28 日		作業時間： 1,5 Hr
顧客名	鈴木内科医院 様		TEL： 0852-22-2123
所在地	島根県松江市西川津町 1 1 9 8 - 5		ご担当 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様		ご担当 神門 様
納入年月日	平成 29 年 8 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容 H30 初回保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 757
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 特に異常はありませんでした。今日のみ、初回保守点検につき、無償となります。			

装置 情報	交換後運転回数： 311	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 13	殺菌/消毒+アル： 298
	リークチェック： 0	自己洗浄： 39	アルコール単独： 2	エア単独： 309

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	〒690-0823 島根県松江市西川津町1198-5 鈴木内科医院 鈴木 重道 TEL 0852-22-2123 FAX 085222-2123 ご署名
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤 井	亀 尾