

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 5 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100371
作業年月日	平成 30 年 5 月 2 日	作業時間： 1, 5 Hr
顧客名	田辺内科胃腸科医院 様	TEL： 0859-33-2010
所在地	鳥取県米子市道笑町4-95	ご担当 赤井 赤木 様
販売店	有限会社 内田医療器 様	ご担当 内田 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30 保守点検実施

カラータッチパネル 交換

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 484
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 420	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 671	殺菌/消毒+アル： 1532
	リークチェック： 55	自己洗浄： 1252	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	カラータッチパネル-式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

30 年 5 月 2 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

田 辺 嘉 直



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤 井

亀 尾