

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年9月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301275
作業年月日	平成30年9月26日		作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	おかだ内科 様		TEL：0857-30-3750
所在地	鳥取県鳥取市富安2丁目149		ご担当 <u>寺谷</u> 様
販売店	宮野医療器（株）		ご担当 米橋 様
納入年月日	平成 29年9月12日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>711</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>267</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： <u>1180</u>	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： <u>219</u>	殺菌/消毒+7L： <u>961</u>
	リークチェック：	自己洗浄： <u>77</u>	7Lコル単独：	エア単独： <u>5</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；水槽側		☒	<u>1</u>
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；チューブ側		☒	<u>1</u>
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄	30 年 9 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 <u>寺谷</u> 印
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井