

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 7 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100047
作業年月日	平成 30 年 7 月 6 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	佐藤内科医院 様		TEL： 0852-21-2425
所在地	島根県松江市天神町15ウイステリア天神1F		ご担当 様
販売店	株式会社サンキ 松江支店 様		ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 4 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H30 保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 328
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
マニホールド“殺菌チューブ”交換済。他、特に異常ありませんで。

装置情報	交換後運転回数： 116	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 246	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド“殺菌チューブ”		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 7 月 6 日
松江市天神町15
佐藤内科医院 印
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾