

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 12 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100730
作業年月日	平成 30 年 12 月 6 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	片山内科胃腸科医院 様	TEL： 0852-26-5511
所在地	島根県松江市上乃木4-20-26	ご担当 様
販売店	有限会社明石医科器械店 様	ご担当 明石 様
納入年月日	平成 25 年 9 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H30年 保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.91 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常無し。

装置情報	交換後運転回数： 20 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 28	殺菌/消毒+アル： 498
	リークチェック： 0	自己洗浄： 630	アルコール単独： 1
		エア単独： 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
ポン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 12 月 6 日

片山 内科胃腸科医院

ご署名 片山 俊介 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店 片山内科胃腸科医院
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 片山 俊介
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

亀尾