

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年3月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300226
作業年月日	平成 31 年 3 月 25 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	胃腸科内科 田中 医院 様		TEL：0852-66-0022
所在地	島根県松江市宍道町宍道946-1		ご担当 様
販売店	エスエスエス (株) 松江支店 様		ご担当 増原 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2019年 保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 398
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐	給水バルブ	正常 ☒ 汚水

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありません（た。次回点検時、給水バルブの交換をお勧め致します）

装置情報	交換後運転回数：139	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：8	殺菌/消毒+アル：550
	リークチェック：435	自己洗浄：381	アルコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31 年 3 月 25 日
島根県松江市宍道町宍道946番地1

胃腸科内科田中 医院

ご署名

田 中 新 亮 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤 井	亀 尾