

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	07-05580	No. 191111
--------	----------	------------

配布先	客先	1	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿	機種	OED-1000
	環営	1	顧客名	吉岡医院 様	機番	100237
	環品	1	所在地	島根県簸川郡斐川町大字莊原3855	納入日	2011年04月20日
			点検者	中澤一裕	作業時間	
					受付日	2019年08月08日
計		3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年11月11日

修理依頼・不具合内容

各部点検 および 保守点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品と劣化した部品の交換を実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：タッチパネル、配管チューブ、パッキン



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：3 殺菌：92、殺菌＋アルコール：791、リークチェック：0
自己洗浄：30、アルコール単独：1、エア単独：1

—以上—

承認
若 19.11.11 井
審査
中 19.11.11 澤
作成
R01.11.11 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1式	
	濃度計、センサー、フィルタ、排水栓、触媒		
2	配管パッキン	1式	
3	タッチパネル	1台	
4	コントロール基板	1枚	今回無償

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528